

○ 适用范围

其他桡动脉穿刺导管插管术后

血管通路建立：肾内科、血透室

介入治疗：心血管内科、介入科、神经内科

血气分析：麻醉科、ICU、急诊科、呼吸科、肿瘤科

有创动脉血压监测：休克、重症疾病、大型手术患者、心胸外科术后患者等

常用型号：

A型：动静脉压迫止血贴型

WZFT 30-100A、WZFT 30-150A、WZFT 40-150A、WZFT 40-205A

B型：无纺布敷贴型

WZFT 60-70B、WZFT 100-100B、WZFT 100-150B、WZFT 100-200B、WZFT 100-250B、WZFT 100-300B、WZFT 150-150B、WZFT 150-200B、WZFT 150-300B、WZFT 200-200B。

C型：防水敷贴型

WZFT 60-70C、WZFT 100-100C、WZFT 100-150C、WZFT 100-200C、WZFT 100-250C、WZFT 100-300C、WZFT 150-150C、WZFT 150-200C、WZFT 150-300C、WZFT 200-200C

备注：B型、C型中产品尺寸：如100-100表示产品的长100mm、宽100MM。



一次性使用无菌敷贴

自动释放压力 动静脉均可适用

- ◎进口记忆弹力胶带 — 提供足够压力,快速止血
- ◎操作简单自动释压 — 无需反复调节,省时省力
- ◎立体组合超吸收敷料 — 可预防并发症,舒适可靠
- ◎免无需接触患者创口 — 预防交叉感染,操作安全

河北卫崭医疗科技有限公司


Hebei Weizhan Medical Technology Co., Ltd

地址：石家庄高新区太行南大街769号京石协作创新示范园内A11栋6楼

电话：400-827-8828

邮箱：postmaster@weizhanyiliao.com

网址：www.weizhanyiliao.com

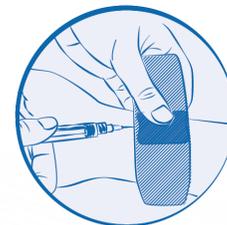


▶ 临床常见动脉止血方法

- ① 纱布加压包扎止血：人工按压10分钟止血后，再用纱布包扎——操作繁琐，容易感染、释放压力困难，容易止血不彻底
- ② 桡动脉压迫止血器：常见旋钮式或充气式，无需按压，压力较大——压力较大，一般1小时需要调节一次，进行加减压操作，避免手掌部位缺血导致组织损伤
- ③ 进口止血贴，胶带较短，粘性非常强，容易引起皮肤不适，出汗容易脱落



▶ 创新型可自动释压止血带

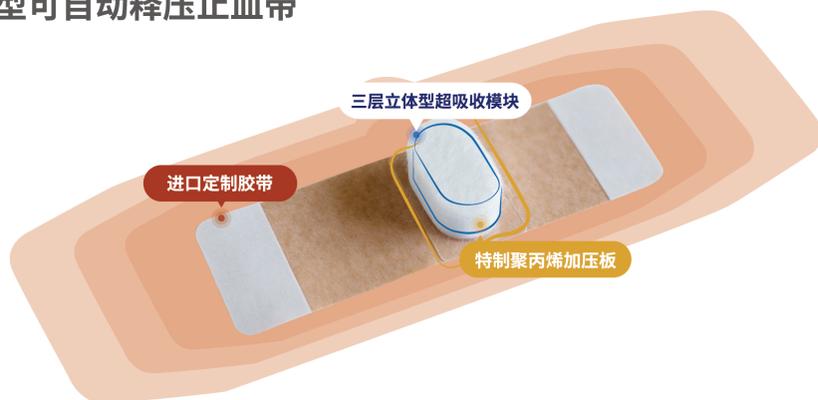


○ 进口定制胶带

>进口3M聚氨酯弹力记忆胶带，透明或半透明可选，其延展性是自身长度的2倍，胶带采用医用级粘合剂，温和不伤皮肤；

○ 特制聚丙烯加压板

>采用超轻超硬聚丙烯材(PP)质制作的加压板，确保手指和胶带产品的压力能够均匀传递到穿刺点，实现快速彻底止血，并保证持续加压。


既轻又硬的特性，保证手指和胶带施加的压力100%传递到穿刺点。

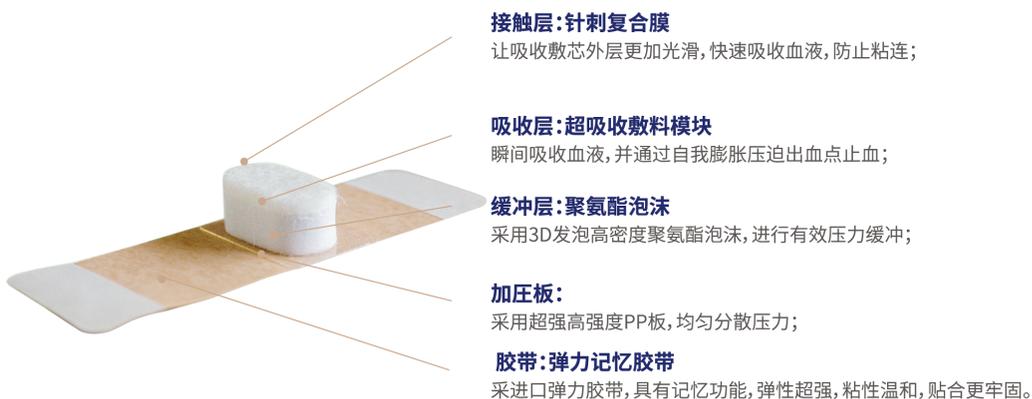


○ 四大产品优势

① 止血快速可靠

> 提供120mmHg的最佳压迫力，科学按压止血；
> 30X15mm的吸收垫面积，可完全覆盖穿刺点，彻底止血。

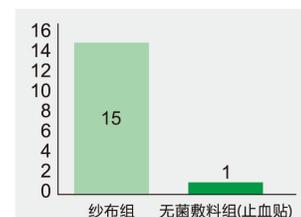

▶ 止血按压时间 (分钟)

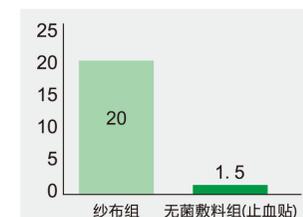

▶ 平均操作时间 (分钟)



▶ 并发症发生率 (百分比)

③ 预防并发症

> 独创的五层茧型吸收垫，可防止创口粘连，防止血液外渗；
> 进口定制胶带，压迫力可靠适中，自动释压，预防渗血、水肿等并发症。

④ 预防感染

> 无需人工按压，避免操作人员直接接触创口，有效预防院内感染。

○ 使用方法

